



아이프로파일러®플러스를 이용한 자동굴절검사

질문은 적게, 대답은 많이

적합한 렌즈를 처방하려면 고객의 눈에 관한 정보가 충분해야 합니다. 아이프로파일러®플러스(i.Profiler® plus)가 자세한 시력 프로파일을 제공하므로, 안경원에서는 고객에게 질문은 적게 하고 대답은 많이 할 수 있습니다.

[하이라이트](#)
[자세히 알아보기](#)
[아이스크립션 기술](#)
[연락처](#)

아이프로파일러®플러스는 안구 웨이브프런트 수차분석기, 자동굴절검사기, 아틀라스(ATLAS) 각막 지형도검사기, 각막곡률측정기 등 4가지 성능이 일체화된 정밀 측정기입니다. 완전 자동화된 측정 절차는 터치스크린으로 손쉽게 컨트롤되며 약 60초 이내에 두 눈의 모든 측정을 완료할 수 있습니다. 눈의 굴절력 분포가 분석되고, 동공 전체에서 재현됩니다. 이런 점에서 아이프로파일러®플러스는 기존의 자동굴절검사기와 다르며, > [아이스크립션® 기술\(i.Scription® technology\)](#) 로 자이스 렌즈를 제조할 수 있게 해줍니다.

특징 한눈에 보기



- 고해상도 하트만-샤크(Hartmann-Shack) 웨이브프런트 센서. 7mm 동공 전체를 1,500개의 점으로 웨이브프런트 조사
- 머리와 턱받침 조정으로 편안한 머리 위치 설정 가능
- 완전 자동화된 측정
- 새로운 특징: 자이스 아이프로파일러®플러스를 자이스 아이컴 모바일(i.Com mobile)로 리모트컨트롤하고, 고객의 아이스크립션® 분석을 iPad에서 시연.
- 자이스 아이스크립션® 기술을 이용하여 야간 시력 향상





- 명료하게 구성된 기능으로 데이터 수집, 평가, 제시, 분석 가능
- 터치스크린 컨트롤로 60초 이내에 두 눈의 모든 측정 완료
- 아이프로파일러® 플러스의 측정값은 아이컴(i.Com) 데이터 관리 시스템에 저장하여, 추후 재측정 없이 컨설팅, 주문, 데이터 보관에 이용할 수 있습니다. 아이컴은 가장 일반적인 PMS(관리 시스템)에 인터페이스로 접속되어 원활한 워크플로우를 보장합니다. 아이컴과 아이프로파일러® 플러스는 패키지 솔루션으로 함께 제공됩니다.

- 아이프로파일러® 플러스는 고해상도 웨이브프런트를 측정하고 각막지형도를 검사하여 고객의 눈의 굴절 상태를 평가하는 데 필요한 모든 데이터를 제공합니다.
- 분석 모드를 사용하면 7차 제르니커 수차 등 다양한 수차가 고객의 시력에 미치는 영향을 시각화할 수 있습니다. 그밖에 아이스크립션® 기술의 이점을 점분산함수를 통해 시뮬레이션할 수도 있습니다.

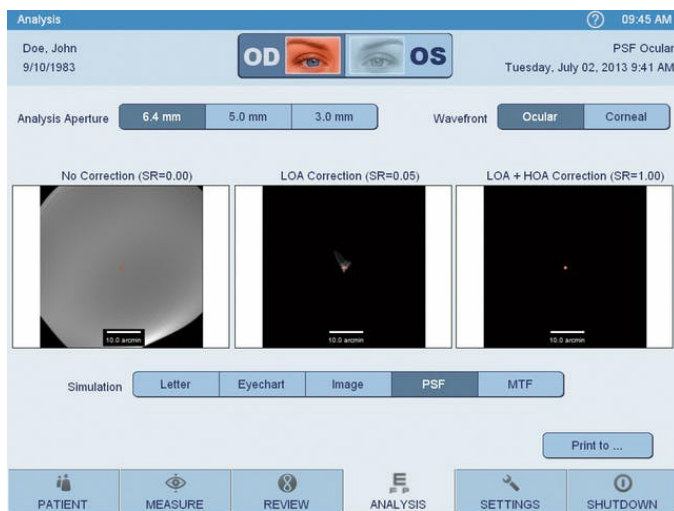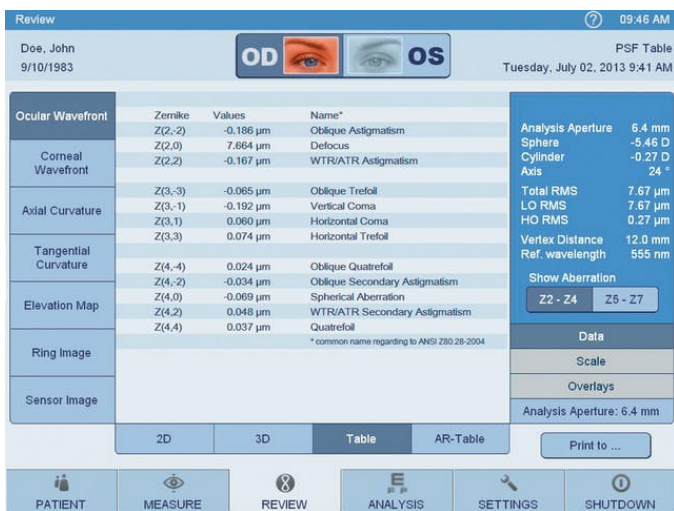

안경원에서의 아이스크립션® 기술 손쉽고 원활하게 워크플로우로 도입 가능

아이스크립션® 기술은 컨설팅 과정이나 안경원의 워크플로우에 응용하기 쉽습니다. 아이프로파일러® 플러스를 이용하여 이 기술을 굴절검사 분석에 편안하게 도입할 수 있습니다.

> [자이스 아이스크립션®에 관한 자세한 정보](#)

	단초점 stock (여 별) 렌즈	단초점 Rx (주문생 산) 렌즈 ²	누진 렌즈	누진 렌즈 ³	이중초점 렌즈
아이스크립션® 기술을 적용하여 출시	-	■	■	■ ³	■ ³

자이스는 전 세계 안경 렌즈 산업을 선도하는 렌즈 제조사로서 최상의 정밀도와 시야의 편안함을 제공하기 위해 노력합니다. 자이스는 렌즈, 광학기기, 계측 장비를 디자인하고 생산할 뿐만 아니라 판매 컨셉 및 기술 서비스도 함께 제공하여 시력 관리의 수준을 끊임없이 향상시킵니다.

궁금한 점은 저희에게 문의하세요.
자이스 고객 지원 사업부

[☎ 02 2252 1001](tel:02-2252-1001)

[✉ 이메일](#)



¹ US Patent 7,744,217. Other patents pending. Product designed and manufactured using Carl Zeiss Vision technology. i.Profiler® plus US Patent 7,744,217. Other patents pending. Product designed and manufactured using Carl Zeiss Vision technology.

² including loop; available with all tints, coatings, treatments, variants

³ locally adapted



탐색하기

시력의 이해
건강 + 예방
라이프스타일 + 패션
운전 + 기동성
스포츠 + 레저
직장 생활

선택을 도와주세요

원용 + 독서용 안경
누진 렌즈
선글라스
오피스 안경
스포츠 안경
어린이 안경
렌즈 코팅
콘택트렌즈
렌즈 세척
안경원에서

서비스

정품 확인
자이스 시력검사
자이스 시력 프로파일
온라인 시력 검사

안경사 및 안 전문의 포털

비즈니스 파트너를 선택할 때 눈을 크게
뜨고 살펴보세요
도구 + 기술
자이스 안경 렌즈
자이스 세척 솔루션
파트너넷
비주스토어